

ジェノマーカー検査 運用マニュアル

ジェノマーカーの運用手順を(日)～(金)の順に説明します。

<検体の発送> 詳細別紙「検査検体の発送方法の説明」をご確認ください。

- ・検査依頼書は1枚目の「控え」をお手元に保管していただき、2枚目の「G&G行」(黄色)をご準備下さい。
 - ・真空採血管または唾液採取キットには、ID番号を記載したラベル※を添付して下さい。ID番号は、検査依頼書に記載したものと同一であることをご確認ください。
 - ・検体ごと別々にチャック付きポリ袋※に入れ、しっかりとチャックを締めて下さい。
 - ・検査依頼書と検体をご確認の上、発送用のクッション封筒※に検査検体を入れて下さい。
 - ・上記クッション封筒と検査依頼書をビジネスレター用封筒※に入れ、ご発送下さい。
- ※ 必要であれば、ラベル、チャック付きポリ袋・発送用クッション封筒・ビジネスレター用封筒・荷送り票を準備、供給いたします。

注意点) ・ラベルへの記載事項はID番号のみとし、決してお客様のお名前は記載しないよう、お願いします。

- ・容器破損時の検体の混合、流出防止のためチャック付きポリ袋をご使用下さい。
- ・大変申し訳ございませんが、土曜、日曜、祝日はお休みをいただいております。休前日にご発送いただく場合は、休み明けの期日指定をお願いします。夏季および年末年始の休業に関しましては、別途ご連絡をいたします。

(日) 検査実施

- ・検査検体が到着しましたら、弊社で検体と依頼書を確認いたします。
- ・確認終了後、ご指定いただきましたアドレスに確認のメールを送付いたしますので、ご確認をお願いします。
- 稀に、DNAが抽出できない等のトラブルが生じる場合があります。その際には早急にご連絡を行い、対応に関しましてご相談させていただきます。


(金) 結果返却

- ・検査受付日より2週間以内に、検査結果を宅配便にて発送いたします。
- ・発送の際には、発送完了をメールにてお知らせいたします。
- ・検査結果は、お客様お一人様分を一冊にした「遺伝子検査結果表」となります。
- ・遺伝子検査結果表は、一冊(お一人様分)ずつ封筒に入れて封印し、受領書とともに送ります。

<結果到着後>

- ・結果が到着しましたら、封筒を開けて受領書の記載事項をご確認ください。
- ・間違いがなければ、受領書にご捺印の上、同封の封筒にてご返送をお願いします。
- ・ご報告いたしました遺伝子検査結果表は、連結可能匿名化情報に基づき、対象となるID番号のお客様に、お渡し下さい。

～検査はこれで終了です～

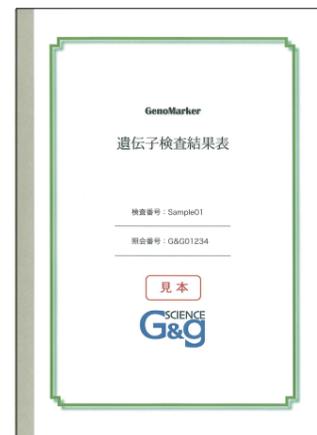

(日) お客様が来られたら



- ・情報提供
- ・質問への対応

(月) 検査説明




- ・検査内容説明
- ・遺伝子検査への同意(同意書記入)

(火) 検体採取



- ・血液
- ・唾液
- ・その他

(水) 発送準備

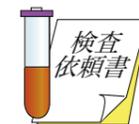

- ・連結可能匿名化
- ・ID番号付与
- ・検査依頼書 記入

検体送付

(木) 検査実施 約2週間



- ・検体受付
- ・SNPs測定
- ・リスク解析

報告書

(金) 結果返却



- ・検査結果の報告
- ・検査結果の説明
- ・今後の改善指導

(日) お客様が来られたら

- ・パンフレット等での情報提供をお願いします。
- ・お客様より、価格、検査内容等でご質問がございましたら、ご対応をお願いします。
- ・検査内容を記載した「パンフレット」と「ポスター」を準備しております。→弊社の定型のパンフレット・ポスターを無償で供給いたします。




(月) 検査説明

- ・対象は、検査に興味を持たれ、検査を受けたいとの意思表示をされたお客様です。
- ・検査内容の説明と同意書の作成(インフォームドコンセント)をお願いします。
- 必要となる下記書類は弊社より供給いたします。

「ジェノマーカー検査説明書」
「同意書」

検査説明書には、検査の内容、限界、検体と検査結果の取扱いに関する内容が、ガイドラインに沿った形で記載してあります。

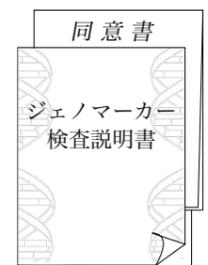

<インフォームドコンセントの取得方法>

検査説明書、同意書をご確認ください。

- ・検査説明書をご利用いただき、お客様に対して、検査内容や遺伝子検査のリスク等のご説明をお願いします。
- ・お客様が納得されましたら、同意書の作成をお願いします。
- ・同意書は2枚複写となっております。説明日、説明場所、説明者をご記入いただき、お客様にお渡し下さい。
- ・お客様に、検体の採取方法、検査項目、データ取扱いのチェック、そして年月日と氏名を記入していただいで下さい。
- ・1枚目の受診者用を検査説明書とともにお客様にお渡しし、2枚目の説明者用は保管して下さい。(G&Gへの送付は不要です。)
- ・「検査依頼書」の「インフォームドコンセントの確認」欄にチェックを入れて下さい。